



Ref. ST101060A

Posicionador SLING ON

etac
Creating Possibilities



Tubular deslizante con múltiples asas en los laterales y dividido en dos partes que se unen mediante cierres.

Desarrollada inicialmente para colocar la cincha de una grúa con el paciente en horizontal sin necesidad de mover al usuario.

Sistema óptimo para usuarios que usan grúa de forma frecuente, para usuarios pesados, o para usuarios que no pueden moverse para la colocación de la cincha. Como el material es el mismo que las sábanas de transferencia, también puede utilizarse para reposicionamientos en la cama

Se coloca debajo del usuario usando una técnica de doblado simple, tanto para la colocación de la cincha como para reposicionar. La cincha para grúa se coloca entre las dos sábanas deslizantes. Cuando la cincha está colocada en su sitio, quitar la parte superior del Sling On. El usuario se eleva siempre en la cincha, nunca en el Sling On.

Medidas: 80 x 170 cm.

Peso máximo usuario: 300 kg.

